

TRAVALERT®
doseringshjälpmedel
hjälp dig att
komma ihåg
att ta dina
ögondroppar



TRAVALERT®
DOSERINGSHJÄLPMEDEL

Kort om glaukom och glaukomläkemedel

Vad är glaukom (grön starr)

Glaukom är en ögonsjukdom, där trycket i ögat stiger. Ett ökat tryck i ögat kan skada synnerven. Om synnerven skadas riskerar de signaler som skickas från synnerven till hjärnan att påverkas. Om sjukdomen inte behandlas kan detta leda till synförsämring.

Hur behandlas glaukom

Glaukom behandlas genom att man sänker trycket i ögat, oftast med hjälp av ögondroppar. Ögondroppar mot glaukom sänker trycket i ögat och minskar också risken för att synnerven ska skadas.

Viktigt

För att få bäst effekt av dina ögondroppar mot glaukom är det viktigt att du följer din läkares instruktioner och tar dina droppar varje dag.

TRAVALERT® doseringshjälpmedel – en hjälp till dig som har glaukom

När man har glaukom ska man vanligtvis ta sitt läkemedel varje dag resten av livet. Många patienter tycker att det är svårt att komma ihåg att ta sina ögondroppar varje dag. Några patienter tycker också att det är svårt att få droppen i ögat.

TRAVALERT® doseringshjälpmedel kan både hjälpa dig med att påminna dig att ta dina droppar och att dosera ditt läkemedel rätt.



Kom ihåg att ta med din TRAVALERT® varje gång du besöker din ögonläkare

TRAVALERT® doseringshjälpmedel - kort vägledning



1. Sätt i flaskan med ögondroppar i den ovala öppningen. Känn efter att du tryckt ner flaskan ända i botten.



2. Skruva av korken. Luta huvudet bakåt och håll TRAVALERT® doseringshjälpmedel över ögat.

Av hygieniska skäl, undvik att låta droppspetsen komma i kontakt med ögat eller omgivande hud.



3. Tryck på det svarta handtaget tills en droppe frigörs och kommer i ögat.

När en droppe frigjorts släpper du handtaget för att undvika att flera droppar frigörs.



4. Har din doktor instruerat dig att ta dina ögondroppar i båda ögonen gör du på samma sätt i det andra ögat.



5. Skruva på korken på flaskan igen



6. I förpackningen med ditt TRAVALERT® doseringshjälpmedel finns också ett droppstöd som du kan välja att sätta på flaskhalsen. Den hjälper dig att placera TRAVALERT® doseringshjälpmedel på ett riktigt sätt över ögat och underlättar för dig att få droppen att hamna i ögat.

Tala med din läkare om du vill ha mer information om TRAVALERT® doseringshjälpmedel och om det passar till dig och dina ögondroppar.



TRAVALERT®

DOSERINGSHJÄLPMEDEL

För mer information se

alltom**gon.se**
LÄR DIG MER OM GLAUKOM

Alcon®

Alcon Sverige AB, 08-634 40 00